

ACCU-CHEK®
Safe-T-Pro Plus

Thiết bị lấy máu tích
hợp kim vô trùng dùng
một lần

REF 03603539200:
Hộp 200 thiết bị lấy máu tích hợp kim vô trùng
dùng một lần

VI Hướng dẫn sử dụng

Đọc hướng dẫn sử dụng này trước khi bạn lấy
máu bằng thiết bị lấy máu tích hợp kim vô
trùng dùng một lần.

Mục đích sử dụng

Thiết bị lấy máu được sử dụng để lấy máu mao
mạch.

Chỉ định

Thiết bị lấy máu được chỉ định để lấy máu mao
mạch nhằm xác định các thông số chẩn đoán.

Đối tượng sử dụng

Đối tượng sử dụng là người dùng không chuyên
nghiệp từ 18 tuổi trở lên và nhân viên y tế.

Nhóm mục tiêu

Người dùng là nhân viên y tế

Nhân viên y tế có thể sử dụng thiết bị lấy máu
cho người lớn, thanh thiếu niên, trẻ em và trẻ
sơ sinh.

Người dùng không chuyên nghiệp

Người lớn có thể sử dụng thiết bị lấy máu cho
chính họ và những người khác từ 3 tuổi trở lên.
Đối với trẻ em và thanh thiếu niên (3 đến 17
tuổi), người chăm sóc là người lớn phải lấy máu
từ đầu ngón tay. Hãy tham khảo ý kiến
nhân viên y tế của bạn trước khi sử dụng lần
đầu cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Chống chỉ định

Người dùng là nhân viên y tế

Máu phải lấy ở đầu ngón tay đối với trẻ em từ
1 tuổi trở lên, thanh thiếu niên và người lớn.


Máu phải lấy ở gót chân đối với trẻ em dưới 1
tuổi và trẻ sơ sinh. Chỉ sử dụng độ sâu đâm kim
thấp và trung bình để tránh chấn thương xương
gót chân.

Người dùng không chuyên nghiệp

Máu phải lấy ở đầu ngón tay. Người dùng không
chuyên nghiệp không được lấy máu của trẻ em
dưới 3 tuổi.

Lợi ích lâm sàng

Có thể lựa chọn 3 chế độ cài đặt độ sâu, tùy
thuộc vào lượng máu cần lấy.

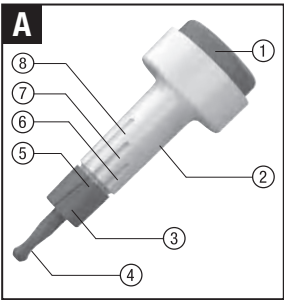

Nhờ có mặt cắt xiên được thiết kế đặc biệt,
đường kính kim nhỏ và kim được silicon hóa,
việc lấy máu hầu như không gây đau đớn.

Các hạn chế

Không có hạn chế nào.

Thông tin về an toàn chung

Hướng dẫn sử dụng có chứa các cảnh báo và
biện pháp phòng ngừa:

Một **CẢNH BÁO** cho biết một nguy cơ nghiêm
trọng có thể dự đoán được.

Một **BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA** mô tả biện
pháp bạn nên thực hiện để sử dụng sản phẩm
một cách an toàn và hiệu quả hoặc để ngăn
ngừa hư hỏng cho sản phẩm.

CẢNH BÁO
Nguy cơ ngạt thở

Sản phẩm này có các bộ phận nhỏ có thể
nuốt phải.

Để các bộ phận nhỏ xa tầm với của trẻ em và
những người có thể nuốt phải các bộ phận
nhỏ.

Nếu thiết bị lấy máu bị rơi hoặc chịu lực có học
nào khác, hãy kiểm tra xem chúng có bị hư hỏng
hay không. Nếu phát hiện chúng bị hư hỏng,
như nứt vỡ, không sử dụng thiết bị lấy máu đó.


Nếu ngón tay hoặc vùng da bị nhiễm trùng,
chẳng hạn như nhiễm trùng móng tay hoặc
nhiễm trùng da, những vùng này không thích
hợp để lấy máu.

Thiết bị lấy máu chỉ được dùng một lần trong
môi trường lâm sàng và phi lâm sàng.

Mô tả thiết bị

Xem hình minh họa **A**:

- 1 Nút bấm phóng kim
- 2 Vỏ dụng cụ
- 3 Bộ điều chỉnh độ sâu đâm kim
- 4 Nắp bảo vệ vô trùng cho kim
- 5 Vạch chỉ độ sâu đâm kim
- 6 Độ sâu đâm kim thấp (khoảng 1,3 mm)
- 7 Độ sâu đâm kim trung bình (khoảng 1,8 mm, đã được đặt sẵn)
- 8 Độ sâu đâm kim cao (khoảng 2,3 mm). Không dùng để lấy máu ở gót chân của trẻ em dưới 1 tuổi và trẻ sơ sinh.

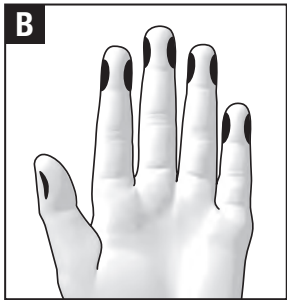

Thiết bị lấy máu là một sản phẩm vô trùng, đã
được khử trùng bằng bức xạ.

Chuẩn bị lấy máu

CẢNH BÁO
Nguy cơ lây nhiễm

Vị trí lấy máu không sạch có thể dẫn đến
nhiễm trùng.

Trước khi lấy máu, hãy vệ sinh vị trí lấy máu.

Người dùng không chuyên nghiệp

Chỉ dành cho trẻ em trên 3 tuổi, thanh
thiếu niên và người lớn

Lấy máu mao mạch ở hai bên đầu ngón
tay (xem các vùng màu đen trong hình minh
họa **B**). Hai bên đầu ngón tay là những vùng ít
bị đau nhất so với các vùng khác trên ngón tay.
Có thể lấy máu ở bất cứ ngón tay nào.

- Rửa sạch tay với nước ấm và xà phòng, sau đó tráng kỹ. Làm như vậy sẽ bảo đảm vị trí lấy máu sạch sẽ và giúp tăng thêm tuần hoàn máu.
- Làm khô tay hoàn toàn.

Người dùng là nhân viên y tế

Trẻ em trên 1 tuổi, thanh thiếu niên và
người lớn

Lấy máu mao mạch ở hai bên đầu ngón tay
(xem các vùng màu đen trong hình minh
họa **B**). Hai bên đầu ngón tay là những vùng ít
bị đau nhất so với các vùng khác trên ngón tay.
Có thể lấy máu ở bất cứ ngón tay nào.

- Rửa tay của bệnh nhân bằng nước ấm và xà phòng rồi tráng kỹ và để khô hoàn toàn. Làm như vậy sẽ bảo đảm vị trí lấy máu sạch sẽ và giúp tăng thêm tuần hoàn máu. Nếu bạn dùng cồn để sát trùng thêm, thì ngón tay cũng phải được để khô hoàn toàn.

Trẻ em dưới 1 tuổi và trẻ sơ sinh

CẢNH BÁO
Nguy cơ chấn thương

Nếu sử dụng thiết bị lấy máu ở đầu ngón tay
của trẻ em dưới 1 tuổi và trẻ sơ sinh, điều đó
có thể gây tổn thương ngón tay.

Chỉ sử dụng thiết bị lấy máu ở gót chân của
trẻ em dưới 1 tuổi và trẻ sơ sinh.



CẢNH BÁO
Nguy cơ chấn thương

Nếu sử dụng độ sâu đâm kim cao, xương gót
chân của trẻ em dưới 1 tuổi và trẻ sơ sinh có
thể bị tổn thương.

Chỉ sử dụng độ sâu đâm kim **thấp** hoặc
trung bình.

Máu mao mạch phải được lấy ở gót chân. Máu
phải được lấy ở hai bên gót chân (xem các vùng
đen ở trong hình minh họa **C**). Kim phải được
đảm dọc theo gót chân (xem các mũi tên trong
phần ảnh phóng to). Trong khi lấy máu, bé phải
được giữ cho bàn chân thẳng đứng với sàn nhà.
Nơi đã đâm một lần rồi không được đâm thêm
nữa.

- Để tăng tuần hoàn máu ở gót chân trước khi lấy máu, bạn có thể cẩn thận làm ấm gót chân lên, ví dụ, bọc chân trong khăn ấm và ấm ở nhiệt độ không quá 42 °C.
- Rửa gót chân bằng nước ấm và xà phòng rồi tráng kỹ và để khô hoàn toàn. Lau gót chân bằng cồn để sát trùng. Sau đó, để cho gót chân khô hoàn toàn.

Lấy máu

CẢNH BÁO
Nguy cơ lây nhiễm

- Nếu nắp vô trùng bị hỏng hoặc không có nắp, có khả năng kim không vô trùng và dẫn đến nhiễm trùng.


Kiểm tra thiết bị lấy máu bằng mắt thường. Không được dùng thiết bị lấy máu nếu nắp bảo vệ vô trùng bị biến dạng, nứt vỡ hoặc hư hỏng. Không sử dụng thiết bị lấy máu nếu thiếu nắp bảo vệ hoặc bất kỳ bộ phận nào của kim bị hỏng. Thái bỏ thiết bị lấy máu.

- Thiết bị lấy máu đã qua sử dụng có thể gây lây nhiễm.

Chỉ sử dụng thiết bị lấy máu một lần để lấy máu.

CẢNH BÁO
Nguy cơ lây nhiễm

- Nếu thiết bị lấy máu đã hết hạn sử dụng, kim lấy máu có thể không còn vô trùng nữa và gây ra nhiễm trùng.

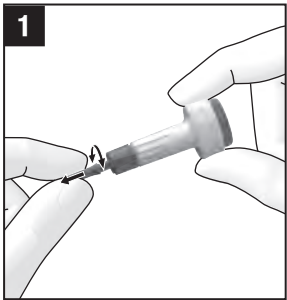

Không được dùng thiết bị lấy máu nếu chúng
đã hết hạn sử dụng. Hạn sử dụng được in bên
cạnh biểu tượng  trên bao bì. Tuổi thọ theo
nghiên cứu độ ổn định: 48 tháng.

1 Vặn nắp bảo vệ vô trùng và nhấc khỏi thiết bị.

2 Xoay bộ điều chỉnh độ sâu đâm kim đến độ sâu đâm kim muốn chọn.

Không chọn độ sâu đâm kim trước khi tháo nắp bảo vệ vô trùng.

3 Cắm thiết bị lấy máu giữa ngón tay trỏ, ngón giữa và ngón cái.

Ấn chặt thiết bị lấy máu xuống vị trí lấy máu đã chọn.

Dùng ngón cái, nhấn nút bấm phóng kim xuống hết mức.

- Rút thiết bị lấy máu ra khỏi vị trí lấy máu.
- Chờ đến khi xuất hiện một giọt máu ở vị trí lấy máu.
- Ngón tay: Vuốt nhẹ ngón tay về phía đầu ngón tay.

Gót chân: Ép nhẹ lên gót chân để nặn ra một giọt máu vừa đủ.

Với một số xét nghiệm chẩn đoán, không được vuốt hay ép đầu ngón tay hoặc gót chân mạnh, vì làm như vậy có thể sẽ dẫn đến kết quả đo bị sai.

CẢNH BÁO
Nguy cơ lây nhiễm

Trong một số trường hợp cá biệt, kim có thể không thun lại vào thiết bị lấy máu sau khi đã lấy máu.

Kiểm tra để đảm bảo kim không nhỏ ra sau khi bạn lấy máu. Nếu kim nhỏ ra, không chạm vào mặt trước của thiết bị lấy máu. Thái bỏ thiết bị lấy máu ngay lập tức.

Điều kiện hoạt động


Sử dụng thiết bị lấy máu trong các điều kiện hoạt động sau:

Giới hạn nhiệt độ: +5 đến +45 °C

Khoảng độ ẩm tương đối: 5 đến 90 %

Bảo quản thiết bị lấy máu

Không để thiết bị lấy máu ở nơi có nhiệt độ khác nghiệt, ví dụ như trong xe hơi không mở máy

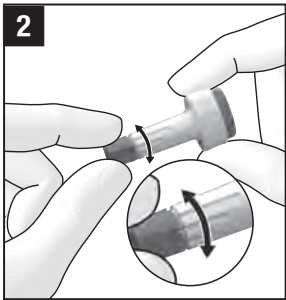

điều hòa chẳng hạn. Tình trạng đó có thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị lấy máu.

Thải bỏ thiết bị lấy máu

CẢNH BÁO
Nguy cơ lây nhiễm

Thiết bị lấy máu có thể gây lây nhiễm nếu bị dính máu.

Thải bỏ thiết bị lấy máu đã qua sử dụng như vật liệu dễ lây nhiễm sao cho thiết bị không gây tổn thương cho bất kỳ ai. Ví dụ: đặt thiết bị lấy máu vào thùng đựng vật sắc nhọn.

- Nếu bạn là người dùng không chuyên nghiệp, hãy tuân thủ theo quy định áp dụng tại quốc gia của bạn. Để biết thông tin về thái bỏ thiết bị lấy máu đúng cách, hãy liên hệ với hội đồng và chính quyền địa phương.
- Nếu bạn là nhân viên y tế, hãy tuân thủ quy trình thái bỏ tại cơ sở của bạn.

Báo cáo các sự cố nghiêm trọng

Đối với bệnh nhân/người dùng/bên thứ ba trong Liên minh Châu Âu và các quốc gia có chế độ quản lý tương tự; nếu xảy ra sự cố nghiêm trọng trong khi sử dụng thiết bị này hoặc như là kết quả của việc sử dụng thiết bị, vui lòng báo cáo với nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia của bạn.


Cập nhật lần cuối

2023-02

Bộ phận chăm sóc khách hàng

Việt Nam

Công ty TNHH Roche Việt Nam
Tổng đài tư vấn miễn phí toàn quốc: 1800 1597
www.accu-check.com.vn

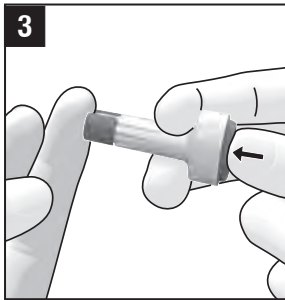

 Làm theo hướng dẫn sử dụng (biểu tượng màu xanh)

 Hạn sử dụng

 Tệt trùng bằng bức xạ

 Chỉ dùng một lần

 Ngày sản xuất

 Thiết bị y tế

 Nhà sản xuất

 Nhận dạng thiết bị duy nhất

 Sổ catalog

 Mã lô

 Tuân thủ các quy định của pháp luật Châu Âu hiện hành

 0123

ACCU-CHEK và SAFE-T-PRO là các nhãn hiệu của Roche.

© 2023 Roche Diabetes Care

 Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-check.com

