

VI

ACCU-CHEK® Safe-T-Pro Uno

05888662

VI Thiết bị lấy máu vô trùng, dùng một lần

Đọc hướng dẫn sử dụng này trước khi bạn lấy máu bằng thiết bị lấy máu vô trùng, dùng một lần này.

Hướng dẫn sử dụng này sử dụng 2 ký hiệu sau đây:

- ⚠️ Ký hiệu này cho biết **có thể có nguy cơ chấn thương hay tổn thương cho sức khỏe của bạn.**
- 📄 Ký hiệu này lưu ý bạn về những **thông tin quan trọng.**

Mục đích sử dụng

Thiết bị lấy máu vô trùng, dùng một lần, được dự định dùng để lấy máu mao mạch ở đầu ngón tay hay nếu bệnh nhân là trẻ dưới 1 tuổi thì lấy ở gót chân.

Các bộ phận của thiết bị lấy máu dùng một lần (xem hình minh họa 1)

- Mô tả**
 - Nút bấm phóng kim
 - Vỏ đựng cụ
 - Nắp bảo vệ vô trùng cho kim

Đường kính nhỏ và được cắt đặc biệt của kim (Ø 0,36 mm, 28 G) cho phép bạn sử dụng thiết bị lấy máu này để lấy cho bệnh nhân hầu như không đau.

Nắp bảo vệ vô trùng giữ cho kim luôn **vô trùng.**

Chuẩn bị lấy máu

2 Trẻ em dưới 1 tuổi

Với trẻ em dưới 1 tuổi, máu mao mạch phải được lấy ở gót chân. Máu phải được lấy ở hai bên gót chân (xem các vùng đen ở trong hình minh họa 2).

Kim phải được đâm dọc theo gót chân (xem các mũi tên trong phần ảnh phóng to). Trong khi lấy máu, bé phải được giữ cho bàn chân thẳng đứng với sàn nhà. Nơi đã đâm một lần rồi không được đâm thêm nữa.

Để tăng tuần hoàn máu ở gót chân trước khi lấy máu, bạn có thể cần thận làm ấm gót chân lên, ví dụ như bọc chân trong khăn ấm và ấm ở nhiệt độ không quá 42 °C.

Rửa gót chân bé bằng nước ấm và xà phòng rồi tráng kỹ. Sát trùng cho gót chân bằng cồn. Sau đó, để cho gót chân khô hoàn toàn.

3 Trẻ 1 tuổi và người lớn

Chúng tôi đề nghị lấy máu mao mạch ở hai bên đầu ngón tay vì những nơi này sẽ ít bị đau nhất. Có thể lấy máu ở bất cứ ngón tay nào (xem các vùng đen ở trong hình minh họa 3).

Rửa tay bệnh nhân bằng nước ấm và xà phòng rồi tráng kỹ. Sau đó, để tay khô hoàn toàn. Làm như vậy sẽ bảo đảm vị trí lấy máu sạch sẽ và tăng thêm tuần hoàn máu. Nếu bạn dùng cồn để sát trùng thêm, thì ngón tay cũng phải được để khô hoàn toàn.

Lấy máu

4 Tháo nắp bảo vệ vô trùng cho kim

- Vặn nắp bảo vệ vô trùng một phần tư vòng rồi tháo ra (xem hình minh họa 4).

⚠️ Không sử dụng thiết bị lấy máu dùng một lần nếu nắp bảo vệ vô trùng cho kim đã được tháo ra trước đó.

5 + 6 Lấy máu

- Cắm thiết bị lấy máu dùng một lần giữa ngón tay trỏ, ngón giữa và ngón cái (xem hình minh họa 5).
- Ấn chặt thiết bị lấy máu dùng một lần xuống vị trí lấy máu đảm kim đã chọn.
- Dùng ngón cái, nhấn nút bấm phóng kim xuống hết mức (xem hình minh họa 6).
- Rút thiết bị lấy máu dùng một lần ra khỏi vị trí lấy máu.
- Chờ đến khi xuất hiện một giọt máu ở vị trí lấy máu.
- Vuốt nhẹ về phía đầu ngón tay hay ép nhẹ lên gót chân để nặn ra một giọt máu.

⚠️ Với một số xét nghiệm chẩn đoán, không được vuốt hay ép đầu ngón tay/gót chân mạnh, vì làm như vậy có thể sẽ dẫn đến kết quả đo bị sai.

📄 Luôn thái bỏ thiết bị lấy máu dùng một lần đã dùng theo quy trình thải bỏ của cơ sở bạn.

Cập nhật lần cuối:

2019-04

Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng và Trung tâm bảo hành

Việt Nam

Công ty TNHH Roche Việt Nam
Tổng đài tư vấn miễn phí toàn quốc: 1800 1597
www.accu-check.com.vn

- 📖 Tham khảo hướng dẫn sử dụng
- ⚠️ Thận trọng, xem các lưu ý về an toàn trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm này.
- 🚫 Chỉ dùng một lần
- 🕒 Hạn sử dụng
- 🧼 Tiệt trùng bằng bức xạ







🏭 Nhà Sản Xuất

📖 REF Số catalog

📦 LOT Mã lô

🌐 GTIN Mã Phân định Thương phẩm Toàn cầu

CE Sản phẩm này thỏa mãn các yêu cầu của Hướng dẫn Châu Âu 93/42/EEC về thiết bị y tế.

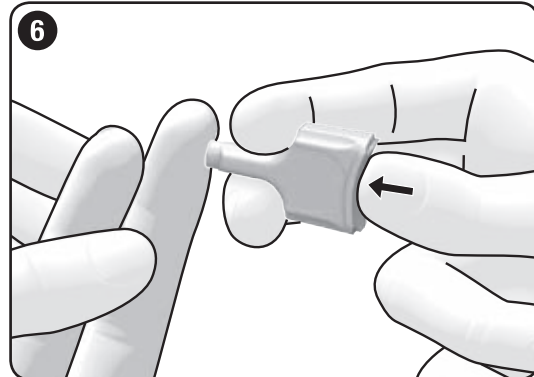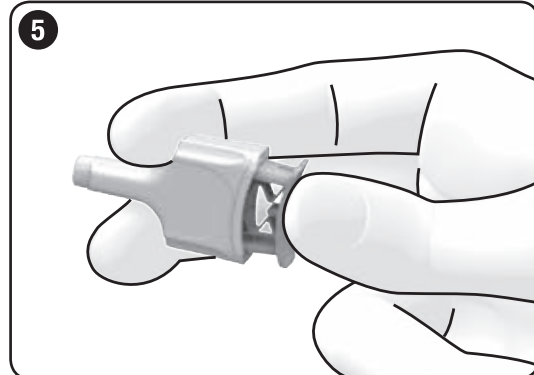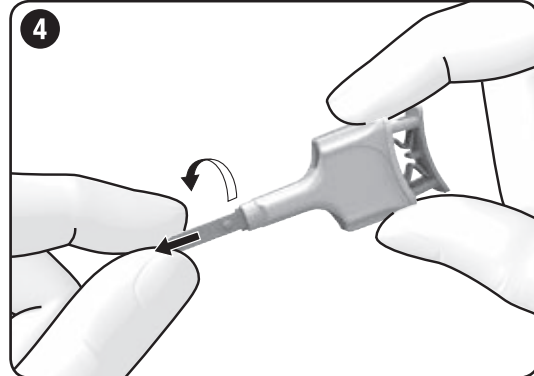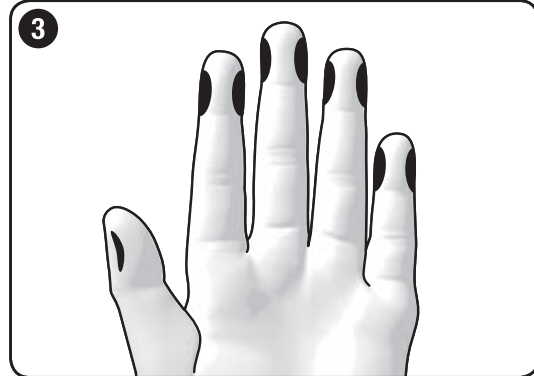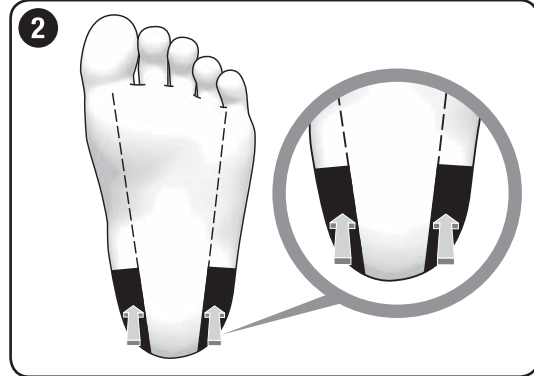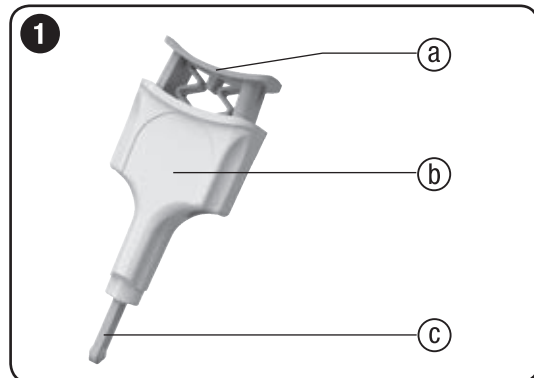

CE 0123

ACCU-CHEK và SAFE-T-PRO là các nhãn hiệu thương mại của Roche.

© 2019 Roche Diabetes Care

🏭 Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-check.com

